

Anleitung zum Anbringen

Wir erklären Ihnen nachfolgend, wie Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen korrekt anbringen.

Der SaHoMa®-II Befestigungsriemen im Überblick

Art.-Nr.: HM-217



Der SaHoMa®-II Befestigungsriemen ist eine Ergänzung zu dem im SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde enthaltenen SaHoMa®-II Halfterriemen. Durch die Führung hinter dem Kopf des Pferdes erzielen Sie mit dem SaHoMa®-II Befestigungsriemen einen deutlich festeren Sitz. Insbesondere bei Pferden, die in Bewegung inhalieren, kann dies unter Umständen notwendig sein.



Schritt 1

Stellen Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen möglichst weit und verbinden Sie diesen einseitig am SaHoMa®-II Gehäuse. Fixieren Sie hierfür einen Schnellverschluss in der entsprechenden Aufnahme am SaHoMa®-II Gehäuse. Optional können Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen auch bereits beidseitig am SaHoMa®-II Gehäuse befestigen.

Achten Sie stets darauf, dass die seitliche Verstellmöglichkeit auf der linken Seite (vom Pferd aus gesehen) sitzt und der Kehlriemen unter dem Kopf des Pferdes entlangführt, um später einen optimalen Sitz des SaHoMa®-II Befestigungsriemens zu gewährleisten.




Schritt 2

Nach Anbringen des passenden SaHoMa®-II Dichtrings setzen Sie dem Pferd nun das SaHoMa®-II Gehäuse auf. Legen Sie anschließend den SaHoMa®-II Befestigungsriemen hinter den Ohren (und ggfs. dem Halfter) am Kopf des Pferdes an. Falls Sie bisher erst einen Schnellverschluss am SaHoMa®-II Gehäuse fixiert haben, können Sie nun den zweiten Schnellverschluss ebenfalls in die Aufnahme am SaHoMa®-II Gehäuse führen.



Schritt 3

Passen Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen nun mithilfe der seitlichen Verstellmöglichkeit, die unter dem linken Auge liegen sollte, an den Kopf des Pferdes an. Anschließend wird der Kehlriemen, der unter dem Kopf des Pferdes entlangführt, mithilfe des Klemmverschlusses fixiert. Der Kehlriemen sorgt dafür, dass sich der SaHoMa®-II Befestigungsriemen vom Auge des Pferdes wegbewegt. Anschließend sollte das SaHoMa®-II Gehäuse fest auf dem Pferdekopf sitzen. Bringen Sie nun alle weiteren Komponenten des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde an, bevor Sie die Inhalation starten.

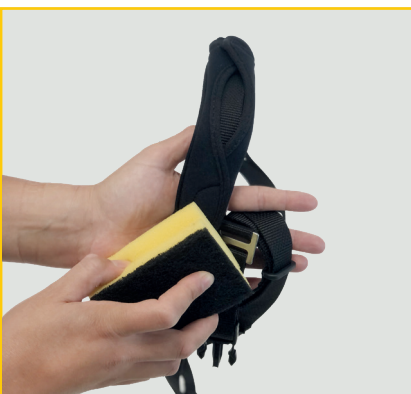

Reinigung des Befestigungsriemens

Leichten Schmutz am SaHoMa®-II Befestigungsriemen können Sie mit warmem Wasser und einer kleinen Handbürste entfernen. Sie können den SaHoMa®-II Befestigungsriemen bei starken Verschmutzungen außerdem in der Waschmaschine waschen. Legen Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen hierfür in ein gepolstertes Wäschenetz und stellen Sie zum Waschen den Schongang mit einer Temperatur von 30° C ein. Nutzen Sie ein mildes Waschmittel und verzichten Sie auf Weichspüler.